

Infinity® Acute Care System Решение для мониторинга пациентов


Модернизируйте ваш клинический процесс с помощью мониторинговой системы Infinity® Acute Care System (IACS). Многофункциональный монитор пациента связан с медицинским терминалом, отображающим физиологические параметры в реальном времени и предоставляющим доступ к ИТ (IT) приложениям, для всестороннего анализа и оперативного принятия решений непосредственно на месте оказания медицинской помощи.

Infinity® P2500

сетевой концентратор и блок питания для монитора M540 и дисплея Medical Cockpit.

Infinity® Medical Cockpit

управляющий медицинский терминал – доступен в двух размерах – отображает параметры, полученные монитором Infinity M540, а также данные ИТ (IT) приложений, взаимодействующих с клинической и госпитальной информационной системой.

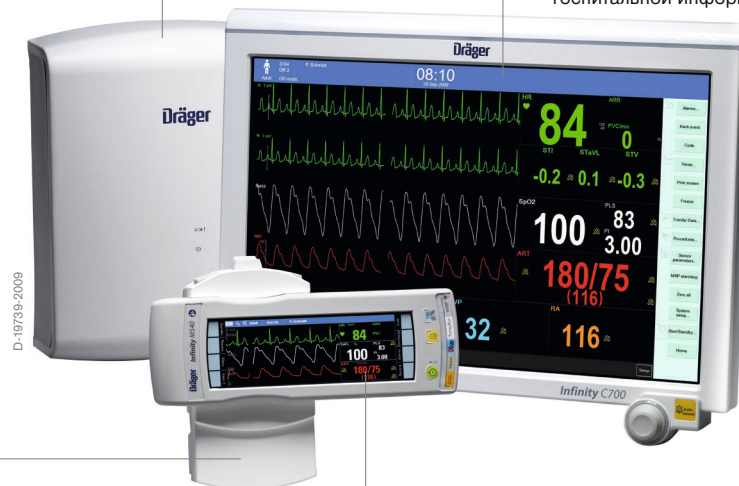

Infinity® M500

докинг-станция сохраняет параметры настройки профиля монитора M540 и заряжает его внутренний аккумулятор для транспортировки пациента.

Infinity® M540

многофункциональный монитор непрерывно отображает данные пациента в режиме реального времени при транспортировке и в стационаре. Экран с автоматическим поворотом для правильной ориентации изображения.

Преимущества

Непрерывное наблюдение

Установите монитор Infinity M540 на док-станцию для подключения к проводной информационной сети непосредственно рядом с пациентом. Для транспортировки пациента снимите M540 с док-станции и он начнет передавать данные по беспроводной сети.

Состояние пациента при этом может контролироваться с помощью центральной станции Infinity CentralStation. После стыковки монитора с док-станцией на новом месте, система автоматически получает записанные данные из предыдущего управляющего терминала (Medical Cockpit), в том числе до 96 часов трендов, а также загружает из M540 данные собранные во время транспортировки.

Одна платформа мониторинга для всей больницы

Один многофункциональный монитор Infinity M540 сопровождает пациента на протяжении всего лечения - от поступления до выписки. Добавляйте требуемые параметры по мере необходимости с помощью модулей MPod и кабелей MCable. По мере улучшения состояния пациента контроль за теми или иными параметрами может быть завершен путем отключения соответствующих модулей и датчиков.

Функциональная совместимость системы

Подключив к системе Infinity Acute Care System аппарат искусственной вентиляции Dräger вы сможете наблюдать за рекрутментом легких, трендами параметров дыхания и физиологическими реакциями на терапевтические мероприятия. На экране медицинского терминала Medical Cockpit совместно отображаются гемодинамические и респираторные данные.

В операционном зале мониторинговая система Infinity Acute Care System расширяет функционал анестезиологической рабочей станции, предоставляя врачу: контроль за жизненно важными показателями пациента, доступ к сетевым и веб-приложениям (web), а также возможность ведения электронной наркозной карты.

Поддержка принятия решений

Получите полную клиническую информацию непосредственно на месте оказания медицинской помощи и с помощью встроенных инструментов анализа оперативно оцените эффективность терапии и лекарственных препаратов. Благодаря поддержке информационных технологий (ИТ) медицинский терминал Medical Cockpit позволяет получать и обрабатывать данные из информационных систем Dräger.

Используйте веб-браузер Internet Explorer® 11 с поддержкой HTML5 и ИТ-вкладки системы, чтобы настроить рабочие приложения и инструменты анализа. Функция разделения экрана позволяет отображать данные мониторинга в режиме реального времени совместно с информацией, полученной из внутрибольничных систем и приложений. Запускайте веб-приложения, используя возможности встроенного Citrix® клиента медицинского терминала Medical Cockpit.

Преимущества

Сконфигурированные и настраиваемые форматы экрана медицинского терминала Medical Cockpit

Для удобства работы на управляющем терминале Medical Cockpit доступно до восьми предварительно настроенных режимов (видов) отображения данных. Дополнительно пользователи могут создать еще до 8 собственных конфигураций экрана. Границы тревог и настройки параметров адаптируются в соответствии клиническими задачами и категориями пациентов. Функция разделения экрана позволяет непрерывно отображать текущие измерения параметров пациента и одновременно с этим просматривать записи трендов и событий, выводить на экран информацию от интегрированного в систему оборудования (ИВЛ, НДА и др.), а также запускать программные приложения.

Хранение трендов, событий и тревог

На управляющем терминале Medical Cockpit доступно до 96 часов трендов, и до 72 часов – на мониторе Infinity M540. Данные трендов и событий, собранные во время транспортировки пациента, автоматически передаются на медицинский терминал по прибытии и представляются в виде графиков и таблиц.

Следите за значимыми событиями в ходе лечения пациента. Система хранит до 150 событий, включая сигналы тревоги для всех контролируемых параметров, и позволяет отображать их в виде 20-секундных фрагментов.

Компоненты системы



D-19701-2009

Infinity® M540

Оптимизируйте рабочие процессы с помощью монитора, который переводится из стационарного режима работы в транспортный одним нажатием клавиши. Датчики и кабели остаются подключенными к пациенту при транспортировке, обеспечивая непрерывный контроль и запись параметров, а также сигналов тревог, в режиме реального времени. Infinity M540 можно использовать как автономный монитор или подключить его к ИТ-системе больницы, чтобы получить доступ к клинической информации и приложениям для анализа данных.

Компоненты системы

D-2428-2016



Док-станция Infinity M500

Компактная док-станция заряжает встроенный аккумулятор M540 и передает собранные монитором данные на медицинский терминал Infinity Medical Cockpit.


D-57031-2014



Медицинский терминал Infinity C700/C500 Medical Cockpit

Infinity C700/C500 Medical Cockpit – основной компонент системы Infinity Acute Care System (IACS) для отображения и доступа к данным непосредственно рядом с пациентом.

D-1195-2009

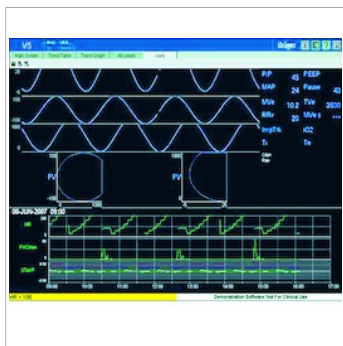

Программный пакет сервера обмена данными Infinity® Gateway Suite

Infinity Gateway – это пакет программного обеспечения, основанный на открытых стандартах, реализующий гибкую интеграцию сети Infinity и существующей ИТ-инфраструктуры. Пакет состоит из приложений, интерфейсов и средств доступа к данным для создания необходимых механизмов обмена информацией пациентов между сетью Infinity и другими системами больницы.

D-19770-2009



Infinity P2500

Infinity P2500 – это источник питания и сетевой концентратор для монитора Infinity M540 и управляющего терминала Infinity Medical Cockpit, входящих в состав системы Infinity Acute Care System. P2500 также позволяет подключать сетевые устройства к системе внутрибольничной сигнализации (для оповещения персонала).

Принадлежности

D-7685-2010



Комплект отведения ЭКГ MonoLead

Запутавшиеся провода. Потерянное время. Дискомфорт пациента. Распутывание проводов традиционных аппаратов ЭКГ утомительно и отнимает много времени. Оно отвлекает ваше внимание от пациента. При подсоединении кабелей вам было необходимо их распутать и направить отведения. Но это осталось в прошлом. С MonoLeads вы будете уделять больше времени пациентам и меньше времени кабелям.

D-19899-2009



Infinity® MPod®-Quad Hemo

Удобное и функциональное решение для подключения датчиков и измерения инвазивного давления. Infinity® MPod®-Quad Hemo - многофункциональный модуль объединяющий в себе измерение до четырех каналов инвазивного давления, сердечного выброса (С.О.), давления заклинивания в легочной артерии (PWP) и температуры.

D-19897-2009



Infinity® MCable®-Dual Hemo

Infinity® MCable®-Dual Hemo простое и эффективное решение для одновременного измерения до двух каналов инвазивного давления.

D-19702-2009



Infinity® MCable®-Masimo SET®

Infinity® MCable®-Masimo SET® – точная и надежная пульсоксиметрия в любых клинических условиях. Гарантированное качество измерений даже в условиях низкой перфузии и при движениях пациента. Значительное снижения количества ложных тревог. Masimo SET может применяться для новорожденных, детей и взрослых пациентов.

Принадлежности



Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®

Расширяет возможности монитора Infinity M540 с помощью новых параметров и функций технологии Masimo rainbow Signal Extraction Technology (SET®) как в стационаре так и при транспортировке пациента.



Infinity MCable® – Nellcor™ OxiMax

Реализует алгоритм Nellcor™ OxiMax SpO₂. С помощью модуля Nellcor™ OxiMax MCable мультипараметрический монитор Dräger Infinity M540 соединяется с датчиками Nellcor™ SpO₂ OxiMax для проведения непрерывного неинвазивного измерения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO₂) и пульса.

D-19703-2009



Infinity® MCable®-Mainstream CO₂

Infinity® MCable®-Mainstream CO₂ измеряет содержания CO₂ в основном потоке.



Infinity® MCable®-Microstream® CO₂

Infinity® MCable®-Microstream® CO₂ выполняет капнометрию в боковом потоке по микроструйной технологии, эффективно помогая оценить дыхательный статус пациента для предупреждения возможного нарушения функции дыхания. На мониторе Infinity M540 отображается график (кривая) и текущее цифровое значение концентрации CO₂ в конце выдоха, концентрации CO₂ на вдохе и частоты дыхания.

D-2422-2016

Принадлежности

D-19896-2009



Infinity® MCable®-Analog/Sync

Осуществляет экспорт аналоговых данных (ЭКГ или артериального давления) или синхронизацию по комплексу QRS (ЭКГ) со внешними устройствами (дефибриллятор, контрпульсатор и др.)

D-19704-2009



Infinity® MCable®-Nurse Call

Соединяет M540 или IACS с внутрибольничной системой сигнализации. Активные предупреждающие или опасные для жизни пациента тревоги передаются от прикроватного монитора во внутрибольничную систему сигнализации.

Однородные продукты

D-71806-2012




Infinity® CentralStation Wide

Просмотр всех клинических данных в реальном времени и в ретроспективе помогает принять наиболее эффективные решения для лечения ваших пациентов. Infinity® CentralStation Wide объединяет жизненно важные гемодинамические показатели пациента с данными от подключенных аппаратов искусственной вентиляции легких, анестезиологических станций и лабораторных систем.

Однородные продукты


D-19/31-2/009

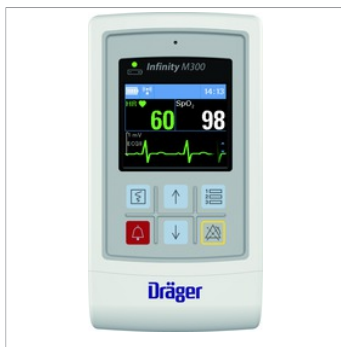

Infinity® M300

Инновационный носимый монитор Infinity® M300 использует существующую сеть Wi-Fi® больницы, полноценно реализуя функции и выполняя задачи полноразмерного монитора в компактном персональном телеметрическом устройстве для взрослых и детей. Встроенные алгоритмы определения аритмии ACE® (Arrhythmia Classification Expert) и обнаружения кардиостимулятора улучшают обработку ЭКГ и помогают уменьшить количество ложных тревог.


onenet_diagram_graphic

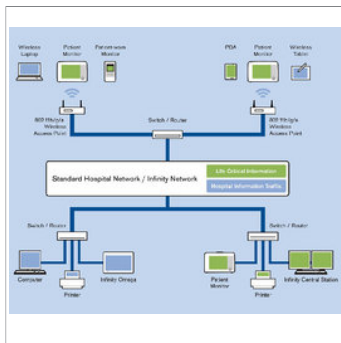

Infinity® OneNet

Технология создания системы централизованного мониторинга жизненно важных параметров пациента на основе имеющейся внутрибольничной сетевой инфраструктуры.


D-1195-2009

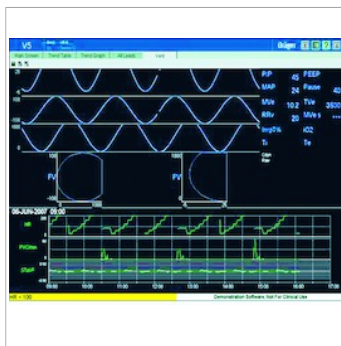

Программный пакет сервера обмена данными Infinity® Gateway Suite

Infinity Gateway – это пакет программного обеспечения, основанный на открытых стандартах, реализующий гибкую интеграцию сети Infinity и существующей ИТ-инфраструктуры. Пакет состоит из приложений, интерфейсов и средств доступа к данным для создания необходимых механизмов обмена информацией пациентов между сетью Infinity и другими системами больницы.


MT-7176-2006

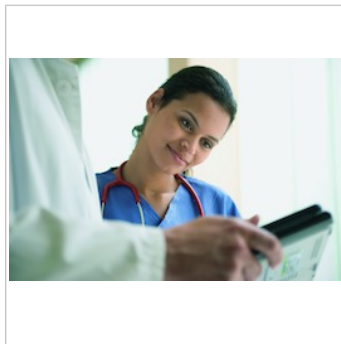

Infinity® Symphony Suite

Теперь вы можете получать и обрабатывать данные мониторинга пациентов, находясь за пределами отделения и клиники. Infinity Symphony Suite обеспечивает удаленный доступ к информации, хранящейся в центральной станции Infinity CentralStation, в режимах: полная запись (Full Disclosure), история событий (Event Disclosure) и тренды данных пациентов.

Однородные продукты

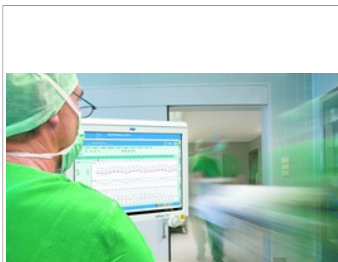

MT-2077-2008

Innovian® Solution Suite

Innovian Solution Suite – это веб-решение, поддерживающее клинический рабочий процесс и осуществляющее автоматизированное электронное документирование в анестезиологии и интенсивной терапии. Благодаря тесной интеграции с решениями Dräger для мониторинга, вентиляции и анестезии, Innovian существенно упрощает сбор и обработку данных пациента, оптимизирует механизмы принятия клинических решений и обеспечивает доступ к информации в любом месте по сети больницы.



D-42446-2015

TOFscan®

TOFscan® – модуль измерения нервно-мышечной передачи с помощью акселерометрии в ответ на стимулирование нервов. Он обеспечивает простой и точный способ определения степени релаксации мышц пациента. TOFscan® помогает принятию взвешанных решений, основанных на имеющихся фактических данных о состоянии нервно-мышечной блокады пациента.



D-8833-2011

Dräger Perseus® A500

Соедините проверенные технологии вентиляции с последними достижениями эргономики и системной интеграции благодаря передовой анестезиологической платформе, разработанной совместно с экспертами со всего мира для усовершенствования Вашего рабочего процесса анестезии.



D-8103-2009

Primus

Применение наркозных рабочих станций, соответствующих высоким стандартам, позволит достичь новых уровней производительности, эффективности и безопасности.

Однородные продукты

D-666-2014



Dräger Fabius Plus

Наркозно-дыхательный аппарат Fabius Plus сочетает в себе высокоэффективную вентиляцию, простоту управления, надежность, широкие возможности размещения дополнительного оборудования, а также простоту интеграции в рабочие процессы операционных любого типа.

D-64716-2012



Dräger Zeus® IE

Самый передовой наркозный аппарат Dräger, объединяющий в себе полный спектр респираторной терапии, многофункциональный мониторинг, уникальные средства автоматизации анестезиологического пособия, а также решения для полноценной поддержки и использования информационных технологий (IT).

MT-6073-2008



Вентилятор Dräger Evita® Infinity® V500

Бескомпромиссная комбинация полнофункциональной высокопроизводительной вентиляции, респираторного мониторинга и средств интеграции системы Infinity® Acute Care System™, отвечающая самым высоким современным и будущим требованиям отделений интенсивной терапии и реанимации.

D-73341-2012



Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей

Новый Babylog предлагает полный функционал для интенсивной терапии маленьких пациентов. Кроме высококлассной традиционной ИВЛ аппарат обеспечивает осцилляционную ВЧ-ИВЛ, назальный СРАР и кислородную терапию. Уникальный мониторинг сочетается с удобным интерфейсом.

Однородные продукты

D-9219-2009



Oxylog® 3000 plus

Компактный и надежный аппарат Oxylog® 3000 plus предлагает высокую эффективность вентиляции. Такие свойства системы, как функция AutoFlow и функция встроенной капнографии, а также возможность проведения неинвазивной вентиляции позволяют оказать необходимую помощь в ходе транспортировки, информируя медицинский персонал об эффективности вентиляции. С Oxylog® 3000 plus вы справитесь с любыми самыми сложными ситуациями.

D-46411-2012



Dräger Savina® 300

Dräger Savina® 300 - непревзойденное сочетание функциональной независимости и мощности турбинной системы ИВЛ, реализующей самые современные режимы вентиляции. Большой цветной сенсорный дисплей и интуитивно понятная операционная система, уделяющая особое внимание основным функциям, значительно упрощают настройку и управление аппаратом.

MT-Q487-2007



Dräger Carina®

Аппарат ИВЛ, созданный с акцентом на неинвазивную вентиляцию легких: Благодаря уникальной технологии SyncPlus®, расширенной функции NIV (неинвазивной вентиляции) и удобному продуманному пользовательскому интерфейсу, Carina® обеспечивает высококачественную и надежную вентиляцию. Компактная конструкция аппарата идеально приспособлена как для стационарного использования так и для транспортировки пациентов.

Технические характеристики

Дополнительный (дублирующий) дисплей

Панель Medical Cockpit может осуществлять вывод видеоданных на один дополнительный дисплей. Максимальное разрешение дополнительного дисплея должно совпадать с разрешением панели Medical Cockpit C500 или C700, к которой он подключен. В зависимости от того, используется C500 или C700, имеют место следующие характеристики выходного сигнала:

Разрешение	C500: 17" (43 см) диагональ дисплея: 1440 x 900 пикселей
	C700: 20,1" (50 см) диагональ дисплея: 1680 x 1050 пикселей

От панели Cockpit на дополнительный дисплей

Максимальная задержка дисплея	250 мс по отношению к сигналу пациента
Подключение к панели Cockpit	Разъем DVI-I
Соотношение сторон	16:10

ИТ-приложения

Технологии Dräger позволяют применять ИТ-приложения непосредственно на месте оказания медицинской помощи, используя опции веб-вкладок и веб-форматы экрана медицинского управляющего терминала. Благодаря этому вы можете работать с электронной историей болезни пациента, изучать результаты лабораторных и радиологических исследований, осуществлять доступ к ресурсам внутренней больничной сети и ИТ-приложениям Dräger. Обратитесь к представителю Dräger для получения более подробной информации об интеграции таких приложений и о поддержке последних доступных версий.

Innovian® Solution Suite

Innovian представляет собой интеллектуальную систему Dräger для управления данными пациентов. Она может быть настроена для отображения информации одного или нескольких пациентов. В режиме для одного пациента при переключении на вкладку Innovian отображаются данные локального пациента; если поступление локального пациента еще не зарегистрировано в системе Innovian Solution Suite, отображается экран регистрации (приема).

Infinity® Symphony Suite

Это приложение обеспечивает ретроспективный анализ информации о пациентах, хранящейся в памяти центральной станции Infinity® CentralStation, благодаря этому она становится доступной практически в любом месте вашей больничной сети.

Infinity® Gateway PatientWatch

Данное приложение позволяет просматривать данные в режиме реального времени и тренды до четырех прикроватных мониторов одновременно на экране медицинского терминала Medical Cockpit.

Citrix®

Мониторная система Infinity Acute Care System поддерживает серверные ИТ-приложения Citrix. Клиент приложения ICA версии 14.1.0 (принимающий модуль – приемник 4.1)

Поддержка серверных ИТ-приложений Citrix XenApp (версий 5, 6 и 6.5).

Веб-браузер Microsoft® Internet Explorer®

Internet Explorer® 11 может быть настроен в качестве одной из ИТ-вкладок, которая содержит несколько предварительно настроенных веб-страниц. Также его можно открыть в режиме разделенного экрана. Дополнительно предусмотрена вкладка веб-приложения для индивидуальной предварительно сконфигурированной страницы.

Протокол экспорта

Позволяет обмениваться данными с другими интеллектуальными решениями Dräger и сторонних производителей (например, с клиническими информационными системами, электронными анестезиологическими картами и пр.) Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим местным представителем Dräger.

Оповещение персонала (Тревожная сигнализация и вызов медсестры)

Система оповещения персонала может быть подключена к мониторинговому комплексу Infinity® Acute Care System. См. подробные технические характеристики кабеля Infinity® MCable-Nurse Call.

Возможность подключения к аппаратуре

Анестезиологическое оборудование:

Dräger Perseus® A500, 1.11

Dräger Primus®, 4.5

Технические характеристики

Dräger Primus IE, 4.5

Dräger Fabius®, 3.35

Dräger Zeus® IE, 1.04

Аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ):

Dräger Evita® V500, 2.31

Dräger Evita V300, 2.31

Dräger Babylog® VN500, 2.31

Dräger Evita 2D, 1.00 и выше

Dräger Evita 4, 1.00 и выше

Dräger Evita XL, 5.00 и выше

Dräger Oxylog® 3000+, 1.04

Dräger Savina® 300, 4.02

Dräger Carina®, 3.21

Maquet Servo-i, V7

Мониторы для центральной гемодинамики (ССО):

Edwards Vigilance II SvO₂/CCO

Edwards Vigileo SvO₂/CCO

Edwards EV1000 SvO₂/CCO

Монитор BIS (БИС – биспектральный индекс ЭЭГ):

Medtronic BIS VISTA

Мониторы NMT (НМП – нейромышечная проводимость):

iDMed TOFscan

Merck TOF Watch SX

Печать на сетевом принтере (рекомендуется для большинства пользователей)

Infinity® Acute Care System может печатать на любом принтере, совместимом с HP Universal Print Driver v6.0.0.18849.

Электропитание системы

Общее энергопотребление системы в составе: медицинский терминал Infinity® Medical Cockpit (C500 или C700), монитор пациента M540, док-станция M500 и источник питания P2500 150 Вт в среднем

Монитор пациента Infinity® M540 и док-станция M500

Подробные технические характеристики M540 и M500 приведены в отдельной брошюре с описанием спецификаций монитора Infinity® M540.

Независимый управляющий медицинский терминал Infinity® Medical Cockpit

Подробные технические характеристики C500 и C700 приведены в отдельной брошюре с описанием спецификаций медицинских терминалов Infinity® Medical Cockpit.

Сетевой концентратор и блок питания Infinity® P2500

Infinity® P2500 обеспечивает подключение системы Infinity Acute Care System к мониторной информационной сети Infinity и электропитанию, а также к системе внутрибольничной сигнализации (оповещения персонала).

Физические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	36 x 22 x 14,9 см
Масса	10 кг
Охлаждение	Конвекционное (требуется крепление P2500 для нормального охлаждения)
Подключения и интерфейсы	Порт экспорта данных – Export Protocol (RS232) Разъем подключения к системе тревожной сигнализации (вызов медсестры)

Технические характеристики

светодиодные индикаторы на лицевой панели	Два взаимозаменяемых разъема подключения системного кабеля; один для M540, один для терминала Medical Cockpit Порт RJ-45 (Ethernet) для подключения к информационной сети Infinity Разъем подключения шнура питания Разъем уравнивания потенциалов (заземление)
	Питание от сети – зеленый, когда устройство подключено к сети переменного тока; индикатор питания от батареи – желтый во время запуска или при аварийном состоянии (например, неисправная батарея)
Требования к окружающей среде	
Относительная влажность (без конденсации)	
при эксплуатации	10 – 95%
Хранение	10 – 95%
Температура	
при эксплуатации	0...40 °C
Хранение	-20...60 °C
Атмосферное давление	
при эксплуатации	485 – 795 мм рт. столба (647 – 1060 гПа)
Хранение	375 – 795 мм рт. столба (500 – 1060 гПа)
Степень защиты от поражения электрическим током	Класс 1 (в соответствии с IEC 60601-1)
Электрические характеристики	
Входное напряжение	100 – 240 В~, 50/60 Гц, 4 А
Аккумуляторная батарея	SLA
Время работы	Не менее 5 мин (при нагрузке 250 Вт)
Время перезарядки	12 часов (максимум)
Защита от попадания воды IPX1 согласно IEC 60529 – защита от вредного воздействия воды	

Спецификация заказа

Система мониторинга пациента IACS с дисплеем C500	MS25510
Система мониторинга пациента IACS с дисплеем C700	MS25520
Принадлежности IACS	MS22113
Системные принадлежности	MS23333
Языковая поддержка: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, шведский, португальский (бразильский), датский, норвежский, японский (катакана), русский, турецкий, польский, греческий, венгерский, китайский (упрощенный), чешский, финский	
Примечание: перечень доступных языков может отличаться. Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему региональному представителю Dräger.	
Блокированные опции	
до 12 каналов (графиков) на экране (примечание: относится только к C500, стандарт для C700)	MS20505
до 16 каналов (графиков) на экране (примечание: для C500 и C700)	MS20506

Спецификация заказа

Полный анализ аритмий	MS22225
ЭКГ в 12 отведениях	MS20508
Многоканальное (более 2 каналов) измерение инвазивного давления	MS20504
Веб-форматы экрана для C500 и C700	MS20511
Веб-вкладки экрана для C500 и C700	MS20512
Редактор пользовательских видов (форматов экрана) для C500 и C700	MS20515
Расчет физиологических параметров	MS20516
Подключение к беспроводной сети (для M540)	MS16266
Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему региональному представителю Dräger.	
Babylog, Carina, Evita, Infinity, Innovian, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, PatientWatch, Perseus, Primus, Savina и Zeus являются товарными знаками компании Dräger.	
Citrix является зарегистрированным товарным знаком компании Citrix Systems, Inc.	
Microsoft и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.	
Другие товарные знаки и названия, используемые в настоящем документе, являются интеллектуальной собственностью их владельцев.	
Некоторые продукты (модели) могут быть доступны для продажи не во всех странах.	
TOFscan изготавливается для Dräger компанией IDMED (Марсель, Франция).	

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электrozаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

